



BioHPP elegance prefabs

Bequem, sicher und schnell zu individuellen, physiologischen Hybridabutments mit der UNIQUE CAM Software bis Mitte 2016 für 12 Marktführende Systeme.

Das UNIQUE CAM Preform-Modul ist die ideale Ergänzung zu jeder vorhandenen CAM-Software. Es erlaubt das bequeme und rationelle Bearbeiten von bredent BioHPP elegance prefabs.




Die Integration in den handelsüblichen Dental-CAD-Produkten erlaubt die direkte Übergabe von Designs an die jeweilige CAM-Software, wobei CAD-Daten direkt und komfortabel geladen werden.

Passende prefab-Designs werden selbstständig erkannt und automatisch in den entsprechenden Rohling und Halter platziert. Der Anwender löst die Berechnung aus, bestückt seine Maschine mit den BioHPP elegance prefabs und kann schnell den Fräsvorgang starten.

Die übersichtliche Oberfläche von UNIQUE CAM

- bequem
- effizient
- sicher

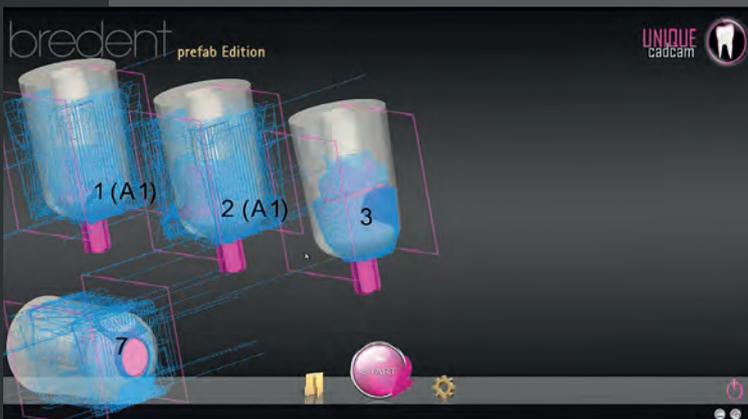



UNIQUE cadcam
Ihr Partner für Dentale CAD/CAM-Lösungen



Klar UNIQUE CAM ist einfach zu bedienen. Der durchdachte Workflow ermöglicht eine schnelle Einarbeitung, zahlreiche Automatik-Funktionen erhöhen die Effizienz. Nur wenige Klicks sind nötig vom Laden der Arbeiten bis zum Berechnen der Fräsbahnen. Je nach CAD-Software und verwendetem Material/Indikation erfolgt Materialauswahl, Anstiften und Platzieren im Rohling vollautomatisch*.



Durch den Import von erweiterten CAD-Konstruktionsdaten entfallen zeitaufwändige manuelle Vorbereitungsschritte, die Fräsbahnen können exakter berechnet werden und der gesamte CAM-Prozeß gestaltet sich sicherer.

Sicher ist das Arbeiten mit UNIQUE CAM. Das Nesting wird durch Assistenten und Automatikfunktionen effizienter und sicherer. Die CAM ist bis ins Detail auf Maschine und Material abgestimmt.

Profitieren Sie von unserem Know-How: die Software meldet anhand der berechneten Fräsbahnen, wenn Werkzeuge ihre maximale Lebensdauer erreicht haben und ausgetauscht werden sollten.

Fräser	Weg (m)	Abnutzung	Lösche	Setze
1 Imes 2.5mm Grinder ...	395.75 von 500.00	79%	Lösche	Setze
2 1.5mm Grinder (Nr 24)	225.25 von 500.00	45%	Lösche	Setze
3 Imes 1mm Grinder (N...	479.30 von 500.00	95%	Lösche	Setze
4 Imes 0.6mm Grinder ...	7.17 von 500.00	1%	Lösche	Setze
5 VHM 2.5mm (Nr 6)	7.08 von 500.00	1%	Lösche	Setze
6 VHM 1.0mm (Nr 7)	14.47 von 500.00	2%	Lösche	Setze
7 VHM 0.6mm (Nr 8)	0.64 von 500.00	0%	Lösche	Setze
8 ZIR 2.5mm (Nr 1)	104.19 von 500.00	20%	Lösche	Setze
9 ZIR 1.0mm (Nr 2)	358.06 von 500.00	71%	Lösche	Setze
10 ZIR 0.6mm (Nr 3)	11.86 von 500.00	2%	Lösche	Setze
11 Nano 2.5mm (Nr 11)	0.00 von 500.00	0%	Lösche	Setze
12 Nano 1.0mm (Nr 12)	0.00 von 500.00	0%	Lösche	Setze
13 Nano 0.6mm (Nr 13)	0.00 von 500.00	0%	Lösche	Setze
14 ZIR 0.3mm (Nr 4)	9.39 von 500.00	1%	Lösche	Setze

Video
einer üblichen Anwendung
<http://www.caelo-dental.net/manuals-video.html>



Unterstützte Fräsmaschinen:

Imes Icore

140i, 240i, 245i, 250i, 350i mit und ohne Loader, 450i demnächst auch 650i (nach Bedarf auch weitere)

Roland

DWX-4, DWX-4W, DWX-50, DWX-51D

VHF

K3 Impression, K4 Impression, S1 Impression, S2 Impression, (N4 Impression gerade in der Umsetzung)

Laserdenta

Open Mill 400, Open Mill 500

Komplette Cam ohne prefab da Halter vorhanden

Dentas

Arrow Mill Beluga, Arrow Mill Smart, Arrow Mill Sirio

Fehlmann

PICOMAX 60

Datron

D5

Primacon

MultiMill 5d

Einführungsangebot

349,- €

Ein vergünstigtes Update auf die UNIQUE CAM Vollversion ist jederzeit möglich. Diese bietet eine einfach zu bedienende Oberfläche und vielfältige Automatik-Funktionen, die ein sicheres und effizientes Arbeiten ermöglichen.

UNIQUE cadcam



UNIQUE cadcam
Insterburger Str. 20 · 40670 Meerbusch · Germany
T: +49 2159 8282649 · E-Mail: info@unique-cadcam.de

In Zusammenarbeit mit
bredent

